



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/gc-tooth-mousse-strawberry-szklivo-w-plynie-35ml-p-442.html>



GC Tooth Mousse Strawberry szklivo w płyńie 35ml

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	GC Corporation Japan

Opis produktu

Odkryj zaawansowaną ochronę i remineralizację dla Twoich zębów z GC Tooth Mousse o smaku truskawkowym! Ta innowacyjna "odżywka do zębów" wykorzystuje zaawansowaną formułę Recaldent CPP-ACP, zapewniając [intensywną remineralizację szkliwa](#) i odbudowę jego struktury. To jest wyrób medyczny do codziennego użytku - stosuj zgodnie z informacją na etykiecie lub zaleceniem stomatologa. GC Tooth Mousse Strawberry dostarcza nie tylko niezbędnych minerałów, ale także zapewnia przyjemność stosowania dzięki truskawkowemu smakowi. Używając tego produktu Twoje zęby będą nie tylko mocniejsze, ale i zdrowsze, a Ty będziesz cieszyć się pięknym uśmiechem każdego dnia!

GC Tooth Mousse Strawberry to swego rodzaju "odżywka do zębów" w postaci musu, która pomoże w remineralizacji szkliwa, utrzymując mocne i zdrowe zęby. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości preparat ten jest nazywany szkliwem w płynie.

Jest preparatem na bazie wody zawierający kompleks Recaldent CPP-ACP (fosfopetydy kazeiny - amorficzny fosforan wapnia) - bioaktywny wapń i fosforany.

Produkt nie zawiera fluoru.

Cechy produktu

- **Remineralizuje szkliwo**, aby zęby były mocne i zdrowe.
- Zawiera opatentowaną formułę Recaldent zapewniającą skuteczną regenerację szkliwa zębów.
- Łagodny **truskawkowy smak** sprawia, że stosowanie jest łatwe i przyjemne.
- Formuła **bez fluoru** jest bezpieczna dla wszystkich grup wiekowych.
- Pomaga **naprawić wczesne oznaki próchnicy i erozji zębów**.
- Łatwa w użyciu i stosowaniu podczas codziennej pielęgnacji zębów.
- Zalecana przez dentystów w celu utrzymania optymalnego zdrowia jamy ustnej.

Wskazania do stosowania

- Odwapnienia szkliwa
- [MIH - Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa](#)
- U osób ze skłonnością do ubytków o charakterze erozyjnym, cierpiących na kserostomię lub zespół Sjögrena,
- W przypadku wysokiego ryzyka próchnicy
- Nadwrażliwość zębów



dentylium

- Po higienizacji w gabinecie stomatologicznym - po zdejmowaniu kamienia - po skaningu ultradźwiękowym, ręcznym oraz profesjonalnym oczyszczaniu powierzchni korzeni (root planning'u)
- Po wybielaniu zębów systemami nakładkowymi

Jak działa preparat GC Tooth Mousse?

Recaldent CPP-ACP wprowadzony do jamy ustnej gromadzi się na błonie nabytej, na płytce nazębnej, komórkach bakteryjnych, hydroksyapatytach i tkance miękkiej dostarczając bioaktywny wapń i fosforany.

Ślina wzmacnia działanie kompleksu Recaldent, a smak preparatu stymuluje wydzielanie śliny.

Im dłużej CPP-ACP i ślina pozostaną w ustach, tym lepszy rezultat, - dlatego warto stosować go po wieczornej higienie: nałożyć na zęby i pozostawić minimum 30 minut lub nawet na całą noc. Nie wymaga wypłukania ani płukania ust wodą. Można aplikować palcem - bezpośrednio na szkliwo lub użyć specjalnych foremek - takich jak do fluoryzacji czy wybielania zębów - jeśli takie mamy.

Przeciwwskazania

Recaldent CPP-ACP jest otrzymywany z kazeiny mleka. Nie powinien być stosowany w przypadku alergii na białko krowie lub konserwanty zawierające benzoesane. Poza tymi wyjątkami może być stosowany bez ograniczeń wiekowych - od zera do stu lat.

Opakowanie: 35 ml / 40 g

Skład

Pure water, Glycerol, CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na, Propylene Glycol, Silicon Dioxide, Titanium Dioxide, Xylitol, Phosphoric Acid, Flavoring, Zinc Oxide, Sodium Saccharin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Magnesium Oxide, Guar Gum, Propyl p-hydroxybenzoate, Butyl p-hydroxybenzoate.